

**Die Augen Ihrer
Kunden sind kostbar.
Schauen Sie auf sie!**



www.schauaufdeineaugen.com

Copyright 2020 by ESW Vision. Alle Rechte vorbehalten. tearstim® ist eine registrierte Marke von E-Swin.
Ref. Nr. M536DE003B____ rev. A 2020/08/20

Schau auf deine Augen.

Der Augen-Service vom Optiker:
Fördert das Augen-Wohlbefinden
und hält Augen fit.

**tear
stim**

Trockene Augen

Viele kennen das Gefühl: Die Augen brennen, kratzen und jucken, sind müde und gerötet oder lassen sich am Morgen kaum öffnen.

Laut Statistiken sind bis zu 20% der Bevölkerung von diesem eingeschränkten Augen-Wohlbefinden betroffen (* Quelle DEWS Report 2017), verursacht unter anderem durch die Belastungen des modernen Augenlebens, wie die Nutzung von Bildschirmen und permanente digitale Reize, künstliches Licht und Luftverschmutzung.

Wie kommt es zum Gefühl trockener Augen?

Die Ursache liegt in einer Schädigung des Tränenfilms – genauer gesagt in einer Funktionsstörung der Meibomschen Drüsen. Diese Drüsen befinden sich an den Rändern des Augenlids und sondern ein fetthaltiges Sekret ab, das die Verdunstung der Tränenflüssigkeit verhindert. Ist diese Fettschicht im Tränenfilm zu wenig oder nicht mehr ausgeprägt, verdunstet die Tränenflüssigkeit zu rasch und das Auge beginnt zu brennen, zu jucken oder sich zu röten.

Tränenfilm



Der Tränenfilm hält die Funktion des Auges aufrecht und besteht aus drei Schichten:

Fetthaltige Schicht.

Wird von den Meibomschen Drüsen erzeugt.

Wässrige Schicht.

Wird von den Tränendrüsen produziert.

Schleimhautschicht.


Liegt direkt auf dem Augapfel und wird von der Bindehaut abgesondert.

Dauerstress für unsere Augen

Ursachen.

Unser Auge ist permanenten Reizen ausgesetzt. Tendenz stark steigend. Negative Umwelteinflüsse und ein immer mehr digitalisierter Arbeits- und Lebensstil können zudem das Augen-Wohlbefinden beeinträchtigen.

- Alter
- Displays
- Augenoperationen
- Austrocknung
- Hormonstörungen
- Ernährung
- Medikamente
- Schadstoffe
- Kontaktlinsen

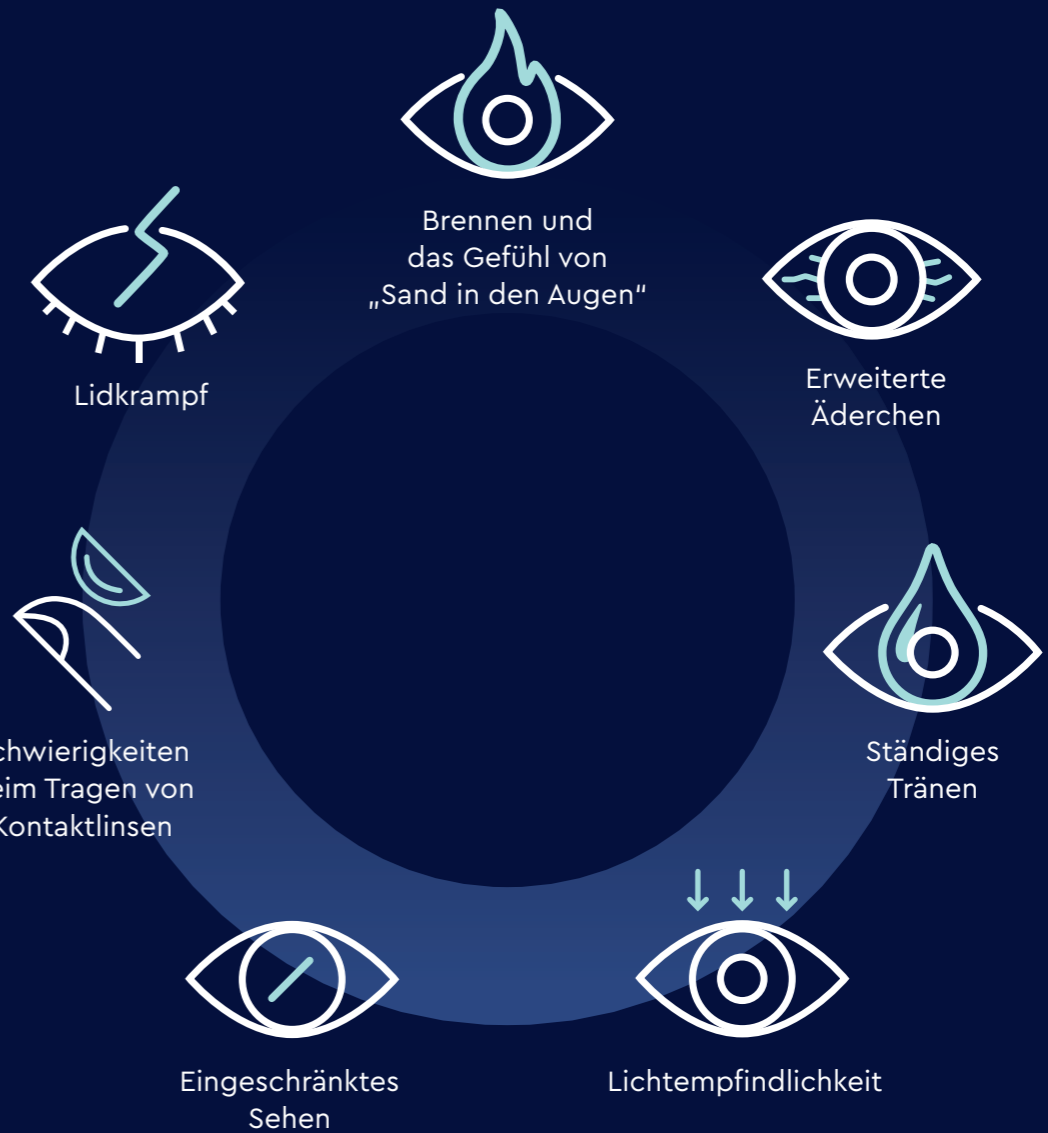

Folgen.

Die Augen fühlen sich trocken an, brennen, jucken, verkleben und röten sich. Die Augen werden müde und verlieren ihre „Fitness“. Bei äußeren Reizen wie Wind,

Licht oder Klimatisierung reagieren sie prompt beleidigt und beginnen zu tränen. Auch das Tragen von Kontaktlinsen kann zur täglichen Qual werden.



Der Augen-Service vom Optiker: Macht Augen fit.

Mit dem Augen-Service vom Optiker kann das Augenwohlbefinden wiederhergestellt und auch die Fitness der Augen langfristig gesteigert werden. Ziel ist, den natürlichen Tränenfilm zu stabilisieren und die Funktionstüchtigkeit der Meibomschen Drüsen zu fördern.

Der Effekt wird mit tearstim® erzielt - einem Gerät zur Durchführung des Augen-Service, das auf der innovativen Pulslicht-Technologie (IRPL® Intense Regulated Pulsed Light) basiert.

tearstim® überträgt Lichtimpulse auf das Hautareal rund um das Auge, in dem Bereich, in

dem der mit den Meibomschen Drüsen verbundene Nerv (Parasympathikus) verläuft. Durch die „Belichtung“ des Nervs werden Neurotransmitter freigesetzt, die mit der Meibom-Drüse interagieren und so die Funktionstüchtigkeit der Drüse anregen können. Auch die Qualität des Drüsensekrets kann damit positiv beeinflusst werden, was wiederum zur Stabilisierung der Lipidschicht im Tränenfilm führt.

Das Ergebnis:

Ein spürbar verbessertes Augenwohlbefinden und die Augen fühlen sich insgesamt fitter an, meist bereits ab dem ersten Augen-Service-Termin.



Einfach und
schnell



Langanhaltend



Effizient

Fittere Augen. Ab dem ersten Augen-Service.

So läuft der Augen-Service ab:

- Der Service dauert nur wenige Minuten.
- Der/die Kunde/in nimmt entspannt in einem Stuhl Platz, wenn möglich mit nach hinten abgelenkter Lehne. Die Augen des/der Kunden/in werden mit den zur Verfügung stehenden **tearstim**® Augenschutzschalen, die für die übertragenen Lichtimpulse undurchlässig sind, abgedeckt. Auf dem Anwendungsbereich, dem unteren Augenlid, wird das **tearstim**® Anwendungsgel aufgetragen.
- Eine Serie von 8-10 Lichtpulsen wird um das Auge ausgeführt. Diese sind sanft und nicht-invasiv.
- Die Serie wird auf dem Unterlid des anderen Auges in gleicher Weise wiederholt.
- Die Anwendung kann bereits nach wenigen Stunden zur Steigerung des Augenwohlbefindens führen. Der Effekt der Anwendung hält anfangs in der Regel einige Tage an und kumuliert sich mit jeder weiteren Anwendung.
- Insgesamt umfasst der Augen-Service 3-4 Anwendungen, um einen langanhaltenden Effekt zu erzielen.
- Zur Auffrischung und zur Erhaltung des erzielten Effekts ist eine jährliche Augen-Service Anwendung empfohlen.

Augen und Licht. Eine gute Verbindung.

Der Augen-Service nutzt eine patentierte Anwendungs-Technologie: IRPL® (Intense Regulated Pulsed Light). Der Effekt hält anfangs in der Regel einige Tage an und kumuliert sich während der

empfohlenen 3-4 Augen-Service Anwendungen. Eine Verbesserung des Augen-Wohlbefindens ist meist bereits ab der ersten Anwendung spürbar.

Vorbeugen macht Sinn.

Mit dem neuen Augen-Service vom Optiker besteht die Möglichkeit, vorausschauend das Wohlbefinden der Augen zu fördern und die Augen – trotz vielfältiger und stetig steigender Reize und Einflüsse – fit zu halten.



Marketing-Paket



POS-Marketing

- Kundenflyer
- Augenschein
- Augenpass
- Empfehlungs-Karte
- POS-Display
- Auslagen-Poster A3-A1
- Augen-Service Qualitäts-Siegel
- uvm.



Presse | Inserat | Mailing

- Presstexte
- Layout Inserat A4
- Direct-Mailing



Online-Medien

- Online-Optiker Portal
- Online-Terminvereinbarung
- Newsletter-Design
- Social-Media Postings



tearstim® Technische Daten



Abmessungen	Maximal 270 × 210 × 380 mm
Gewicht	Maximal 6,4 kg
Größe Verpackung	Maße einschl. Verpackung 612 × 325 × 540 mm
Wellenlänge	> 580–1200 nm
Technologie	IRPL® (Intense Regulated Pulsed Light)
Hersteller-Garantie	2 Jahre
Geräte-Service	wartungsfrei
Installationsart	Tischgerät, mobil einsetzbar

Das perfekte Duo.

www.esw-vision.com



Die innovative Lösung
zur Analyse der
Tränenfilm-Qualität.

Zur langanhaltenden
Steigerung des Augen-
Wohlbefindens