



4. Nebel-Modus: Zur Ausschaltung der Akkommodation wird der Kunde standardmässig 1 x genebelt (Plus-Gläser vorgesetzt). Das Bild (Haus mit rotem Dach) wird dann unscharf wahrgenommen (normal). Bei Kindern kann für eine bessere Genauigkeit die Akkommodation vor jeder einzelnen Messung ausgeschaltet werden, indem dieser Knopf gedrückt wird (3 „Wolken“). Bei Erwachsenen (Pers. >16 Jahren) muss dieser Knopf nicht aktiviert werden.
5. Messkreis des KR-800A.
6. Daten zur Software senden.
7. Messung des Hornhautdurchmessers möglich (nach der KR-800A Messung).
8. Radiergummi
9. Messmodus. Standardässig im Modus „A“ – Semi Auto.
10. Einstellungen
11. Ausschalten (Hauptschalter befindet sich an der Geräteseite)
12. Die aktuelle Seite ist orange markiert (OD → rechts, OS → links)
13. Einstellung der Kinnstützenhöhe