

Dermapenworld™

SOS

SYNERGY OF SOLUTIONS
to
SAVE OUR SKIN

Award Winning Dermapen 4
approved protocol partner:



Dp
DERMACEUTICALS

DIE GESCHICHTE DES ORIGINAL **DERMAPEN**



April 2018

Bahnbrechender Dermapen 4
Die weltweit **ERSTE** digitale
Microneedling-Plattform mit
Bluetooth.



Januar 2014

Mit der 1. Generation der
AOVN-Technologie setzte
Dermapen 3 als Marktführer
neue Maßstäbe.



Januar 2012

2. Generation mit
inkrementellen Design- und
Funktionsverbesserungen.



Juni 2010

DermapenWorld bringt den
original Dermapen auf den
Markt und revolutioniert damit
das Microneedling.



Dermapenworld
ORIGINAL TRUSTED
AUSTRALIAN

WARUM SICH DER UMSTIEG AUF DEN DERMAPEN 4 LOHNT

Mit mehr als drei Millionen Behandlungen, die von autorisierten Behandlungsanbietern durchgeführt wurden, ist Dermapen heute als Goldstandard in der Microneedling-Technologie anerkannt und wird von mehr als 20 000 Kliniken in mehr als 56 Ländern und Vertriebspartnern auf der ganzen Welt unterstützt.

Dermapen wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zu einem der vertrauenswürdigsten Namen in der medizinischen Ästhetik entwickelt. Tausende von Behandlern nutzen die weltweit führende Dermapen-Technologie, mit der sich «die Geschichte der Haut neu schreiben» lässt, ohne Nebenwirkungen oder Ausfallzeiten.

Dp Dermaceuticals sind die einzigen Protokollprodukte, die speziell für die Anwendung vor, während und nach einer Microneedling-Behandlung mit dem Dermapen entwickelt wurden. Diese Protokolle gewährleisten optimale klinische Ergebnisse und bieten ein persönliches Hautpflegeprogramm, das die Ergebnisse maximiert und erhält.

Die tägliche Anwendung von Dp Dermaceuticals und regelmässige Behandlungen mit Dermapen stimulieren die Kollagenproduktion und den natürlichen Erneuerungs- und Heilungsprozess. Das Ergebnis: eine sichtbar glattere, regenerierte und verjüngte Haut.

DERMAPEN & Dp DERMACEUTICALS PERFEKT AUF EINANDER ABGESTIMMT




12 GRÜNDE, AUF DEN DERMAPEN 4 UMZUSTEIGEN



Neue Einstellung für die Narbenbehandlung

Meistern Sie mit dieser exklusiven neuen Einstellung die Narbenbehandlung. Gesichts- und Körperkonturen können mühelos behandelt werden.

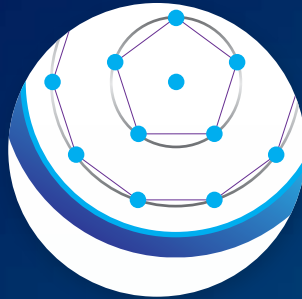

Revolutionäre Kartusche mit 16 Nadeln

Das zum Patent angemeldete Design schafft durch mehr Nadeln mehr Verjüngungskanäle, gleitet sanft und effizient über die Haut für bessere Ergebnisse und optimalen Patientenkomfort.



Visionäres Marketing, mehr Patienten für Ihre Praxis

Vorrangiger Zugang zu innovativen Klinikfinder-Einträgen, Medien und Marketingunterstützung, um für Ihre Praxis und Behandlungen zu werben.



Dual-Power-Betrieb

Komfort und Leistung mit Batterie- oder Netzstrombetrieb.



RFID-Nadelkartusche

Für präzise, zuverlässige und widerstandsfreie Nadeleinstiche.
Automatische Kalibrierung.
Zum Patent angemeldete Technologie.



AOVN™ Rückhalteventile

Grössere Penetration, Regulierte Saugfreigabe, kein Schleppen.



Überlegene AOVN™ 4 Technologie

Advanced Oscillating Vertical Needle (AOVN) Technologie
4. Erhöhte Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit machen diese Verfahren unvergleichlich.



ACM™ – Anti-Kontaminationsmanagement

Garantie für unübertroffene Sicherheit und Schutz. Kein Flüssigkeitsrückfluss, keine Kreuzkontamination und kein Widerstand. Zum Patent angemeldete Technologie.



Digitalanzeige mit integrierten One-Touch Einstellungen

Tiefen-, Geschwindigkeits- und Behandlungseinstellungen auf Knopfdruck verwalten. Echtzeitanzeige für mehr Behandlungssicherheit.



Ergonomisches Design

Mühe-lose, sanfte und komfortable Behandlung für Gesicht, Körper und Kopfhaut. Leichtes, langlebige- ges Gerät mit bequ- emem Handgriff.



Bluetooth- Verbindung

Immer auf dem neuesten Stand! Bleiben Sie mit automatisierter Garantie, Updates und Support an der Spitze der Branche.



7 Jahre Garantie

Mit einer vollständig übertragbaren Garantie, einschliesslich Ersatzteile und Arbeitszeit. Ihre Investition langfristig sichern.

UNVERZICHTBAR

FÜR DAS MICRONEEDLING – HAUTPFLEGEPROTOKOLLE FÜR ZUHAUSE

SCHRITT 1 – REINIGUNG, PEELING UND HAUTHYGIENE

1. TRI-PHASE CLEANSER™

Täglicher Reiniger, der mit seinen drei Phasen (Balsam/Gel/Milch) Verunreinigungen und Make-up entfernt, die Haut nährt und Feuchtigkeit spendet.

2. CLR FOAM CLEANSER™

Täglicher Reiniger, der das Erscheinungsbild problematischer Haut verbessert, z. B. bei Akne.

3. MICRODERM EXFOLIANT™

Vielseitiger Reiniger und Peeling in einem. Er reinigt und klärt schnell und bringt einen erneuerten und gesünder aussehenden Teint zum Vorschein.

4. CLINIPREP™

Diese Rezeptur zur antimikrobiellen Reinigung der Haut ist pH-neutral, dermatologisch getestet und enthält weder Alkohol noch Duftstoffe.

SCHRITT 2 – SEREN

5. HYLE ACTIVE™

Ein für das Microneedling empfohlenes Protokoll und eine intensive Feuchtigkeitszufuhr, die das Gefühl von tiefer Durchfeuchtung und Komfort vermittelt.

6. ANTIOXIDANT COCKTAIL™

Dieses vor und nach der Dermapen-Behandlung aufzutragende Korrekturserum bekämpft sichtbare Alterungseffekte und wirkt gegen einen ungleichmässigen Teint.

7. CBD ELIXIR™

Unser proprietäres CBD ELIXIR ist für die tägliche Anwendung gedacht, um gut in den Tag zu starten. Dieses Elixier enthält einen Extrakt aus CBD mit breitem Wirkungsspektrum, ist sicher und ungiftig. MCT-Kokosnussöl wird mit diesem CBD-Extrakt vermischt, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und die Penetration zu verbessern.

SCHRITT 3 – KORREKTOREN FÜR MORGENS / ABENDS

8. VITAMIN RICH REPAIR™ (MORGENS)

Erforderliche Nachfülllösung, die die intensive Reparatur und Struktur unterstützt und die Feuchtigkeitsversorgung fördert.

9. RETINAL ACTIVE™ (ABENDS)

Diese korrigierende Creme mit Vitamin A enthält eine wirksame Kombination aus Verjüngungseigenschaften und Anti-Aging-Antioxidantien.

10. R.E.R. EYE SERUM™

Eine hochwirksame Augencreme, die Verjüngungseigenschaften und Anti-Aging-Antioxidantien kombiniert. Eine ihrer wichtigsten Eigenschaften ist ihre intensive Infusion von Vitamin A (Retinaldehyd).

11. CBD R.E.R.™ AUGENCREME

Unsere CBD-haltige, auffüllende Augencreme wirkt direkt gegen geschwollene Augen und die Austrocknung der Haut um die Augen. Calphasomes enthalten ein CBD-Konzentrat mit vollem Wirkungsspektrum und BVOSC – ein stabilisiertes und leistungsstarkes öllösliches Vitamin C –, um die Auswirkungen von Oxidation und Alterung umzukehren und die gesunde Zellfunktion zu unterstützen.

12. BRITE LITE™ (MORGENS/ABENDS)

Dieser vielseitige Korrektor verhindert eine übermässige Pigmentbildung und reduziert das Auftreten von Altersflecken, Melasmen, Akne und ungleichmässigen Hauttönen.

13. SSSCAR™

Dieses wissenschaftlich entwickelte Produkt behandelt geschädigte Haut und bestehende Narben, um eine schnellere Erholung zu ermöglichen und Rötungen und Verfärbungen zu reduzieren.

14. ÜBER CBD CALM BALM™

Mischung aus drei Bio-Ölen – Mandel, Olive und Jojoba – mit aus Hanf gewonnenem CBD-Isolat. Das CBD-Isolat ist in unseren eigenen Calphasomes eingekapselt, um die Abgabe an die Haut zu verbessern. Dieser Balsam bietet schnelle und sichere Linderung bei häufigen Beschwerden wie Schmerzen, während er gleichzeitig Feuchtigkeit spendet und Spannungen löst.



DermapenWorld hat die weltweit erste Meso-Infusion-Hautpflegeserie entwickelt:
Dp Dermaceuticals – unverzichtbare Produkte für das Microneedling sowie zur Unterstützung von Hautpflegeprotokollen zuhause für bessere Behandlungsergebnisse.

Die aktiven Meso-Glide-Kombinationen haben bewährte Protokollergebnisse, die von Tausenden von Anwendern auf der ganzen Welt geschätzt werden – für eine sichere Wirkstoffinfusion in die Haut ohne jegliche Nebenwirkungen.

SCHRITT 4 – BEFEUCHTUNG

15. SKIN VENEER™

Diese intensive Feuchtigkeitspflege inspiriert sich an der natürlichen Barrierefunktion der Haut, befeuchtet trockene bis sehr trockene Haut und schützt sie vor rauen Umweltbedingungen.

16. CLR LOTION™

Diese korrigierende Lotion hilft, das Aussehen problematischer Haut zu klären, indem sie Feuchtigkeit spendet, die Fettregulierung ausgleicht und das Potenzial für Hautausschläge reduziert.

17. CBD VISSAGE™

CBD VISSAGE ist eine hydrierende Feuchtigkeitscreme zum Schutz vor blauem Licht, die speziell für moderne Bedürfnisse entwickelt wurde. Sie schützt die Haut vor Schäden, die durch chronische Exposition gegenüber blauem Licht, das von Smartphones, Computern, Leuchtstoffröhren und Fernsehmonitoren ausgestrahlt wird, schleichend verursacht werden.

MASKEN

Unsere innovative Kollektion der drei **HYLA ACTIVE MASKEN** zielt auf bestimmte Bereiche ab und spendet wirksame Feuchtigkeit für eine stärkere und widerstandsfähigere Haut. Jede der Masken formt Ihr Gesicht, Ihren Hals und Ihr Dekolleté oder Ihre Hände mit reiner, hydrierender Hyaluronsäure, stimulierenden Kupferpeptiden und den heilenden Eigenschaften von Zink und Vitamin B5.

18. HYLA ACTIVE 3D SCULPTURED MASK™ (GESICHT UND OBERER HALS)

19. HYLA ACTIVE NECK & DÉCOLLETÉ SCULPTURED MASK™

20. HYLA ACTIVE HAND PAMPERING MASK™

21. BRITE LITE 3D SCULPTURED MASK™

Eine innovative Stoffmaske, die die Ergebnisse von Hyperpigmentierung und Aufhellungsbehandlungen verbessert.

22. R.E.R EYE MASK™

Diese Masken aus erneuerbaren, verfeinerten zweikomponentigen Pflanzenfasern sind perfekt geformt, um die Augenpartie zu konturieren und diesen Bereich, in dem Ausdruckslinien und Fältchen auftreten, schnell und sichtbar wieder aufzupolstern.

23. COVER RECOVER

Dieses atmungsaktive Make-up/Hautpflege-Produkt revolutioniert das Konzept der korrigierenden Camouflage-Foundation, da es makellos abdeckt, LSF 30/PA+++ enthält und bei Entzündungen, Rötungen, Beschwerden und Hitze nach Verjüngungsbehandlungen sofort kühlt. Klinisch formuliert mit heilenden Wirkstoffen. Geeignet für die tägliche Anwendung.

Erhältlich in 11 Farbtönen – von Clear & Sheer bis zum dunkelsten Ebony.

ÜBER PEELS

Unsere professionellen ÜBER PEELS sind innovative chemische Peelings, die speziell für Dermapen-Behandlungen oder als eigenständige Behandlung zur sichtbaren Verbesserung von Falten, Dyschromien, Akne und allen Formen atrophischer Narben entwickelt wurden.

24. ÜBER PRO

25 % L-Mandelsäure, Resorcinol, Brenztraubensäure, Milchsäure, Niacinamid, Kojisäure, Arbutin, Retinal, Natriumhyaluronat, Kupfetriptide-1/Bis (Tripeptid-1) Kupferacetat, Ferulasäure.

25. ÜBER MD

35 % Trichloressigsäure, Beta-Lipoxysäure/Capryloyl-Salicylsäure, Salicylsäure, Vitamin A – Retinaldehyd, Brenztraubensäure, Phenol.

PROFESSIONELLE «MG»-KOLLEKTION:

Unsere neuen, hochwirksamen professionellen MG-Formulierungen in 3-ml-Glasfläschchen bieten Komfort und Anwenderfreundlichkeit und sind für die Anwendung mit Dermapen, Dermapen Infuse, Dermapen Inject und anderen Meso-therapie-Behandlungen geeignet. Zur Anwendung bei alternder, problematischer, hyperpigmentierter und vernarbter Haut (siehe Seite 6-7).



MG-KOLLEKTION

STERIL UND UNVERZICHTBAR



MG-HA35+

Zur intensiven Hydratisierung der Haut und zur Verbesserung der sichtbaren Alterungseffekte

- Hohe Konzentration von Hyaluronsäure 35 mg/ml x 3 Molekülgrößen
- Calphasomes und HylaFuse Abgabesysteme; Calphasomes bestehen aus Calciumpartikel, die von Natur aus porös sind, um ein kontrolliertes Abgabesystem für bioaktive Substanzen bereitzustellen, während sie den sauren pH-Wert des Stratum corneum als Freisetzungsmechanismus nutzen
- Enthält eine neue, revolutionäre Telomertechnologie (GGP) zur Reduzierung der sichtbaren Auswirkungen alternder Zellen, indem es hilft, die Lebensdauer einer Zelle zu verlängern
- Die Entzündungshemmer Darutosid (Wirkstoff von Sigesbeckia orientalis) und Centella-asiatica-Extrakt helfen bei der Wundheilung und reduzieren sichtbar Reizungen und Rötungen



MG-HA35

Wiederherstellung, Auffrischung, Verbesserung des Aussehens mit einer wirksamen Form von Hyaluronsäure

- Hohe Konzentration von Hyaluronsäure 35 mg/ml x 3 Molekülgrößen
- Kombiniert mit HylaFuse und Zink und B5
- **Leistungsstarke Inhaltsstoffe:** HylaFuse und Zink und B5



MG-R.A.S.

Zur Unterstützung der Anti-Aging-Behandlung und bei Narben

- Eine wirkungsvolle Mischung aus Antioxidantien, Vitaminen, Peptiden und Pflanzenextrakten, die für ihre Anti-Aging- und hautverbessernde Wirkung bekannt sind
- Enthält HylaFuse – Hyaluronsäure mit einem Molekulargewicht von 3; klinisch erwiesen, dass sie 150 % wirksamer absorbiert wird als andere Formen von Hyaluronsäure
- **Leistungsstarke Inhaltsstoffe:** Vitamin A (Retinaldehyd), Vitamin E, Centella-asiatica-Extrakt, Kupferpeptide

PERFEKTE MISCHUNG GEGEN ALTERUNGSEFFEKTE, NARBEN,

UNVERZICHTBAR

• STERIL • FÜR DEN EINMALGEBRAUCH • KOMFORTABEL



MG-BL

**Zum Aufhellen und Auf-
frischen ungleichmässiger
Hauttöne**

- Hilft, das Erscheinungsbild von hyperpigmentierter oder von Melasma betroffener Haut zu verbessern
- Enthält HylaFuse – Hyaluronsäure mit einem Molekulargewicht von 3; klinisch erwiesen, dass sie 150 % wirksamer absorbiert wird als andere Formen von Hyaluronsäure
- **Leistungsstarke Inhaltsstoffe:** Süssholzwurzel, Uva-Ursis-Blattextrakt, Vitamin C und Kojisäure



MG-CLR

**Entwickelt, um die Haut zu
klären und Hautprobleme zu
behandeln**

- Eine wirksame Kombination aus antimikrobiellen Peptiden und biokompatiblen Extrakten, die das Hautbild bei Hautproblemen wie Akne, Mitessern/Komedonen, offenen Poren und fettiger Haut klären und verbessern soll
- Enthält HylaFuse – Hyaluronsäure mit einem Molekulargewicht von 3; klinisch erwiesen, dass sie 150 % wirksamer absorbiert wird als andere Formen von Hyaluronsäure
- **Leistungsstarke Inhaltsstoffe:** Niacinamid, Boswellia-serrata-Extrakt, Süssholzwurzel, Honigextrakt, Kojisäure, Vitamin C, Oligopeptid-10



PIGMENTIERUNG, AKNE UND HAUTPROBLEME

VOR-WÄHREND-NACH

OPTIONEN FÜR ALLE BEHANDLUNGSBEDÜRFNISSE

AKNE/ PROBLEMLHAUT

MG STERIL 5ml



MG-CLR*

INSTITUT



HYLA ACTIVE
CLR LOTION

FÜR ZUHAUSE



HYLA ACTIVE
CLR LOTION

ROSACEA



MG-HA35+*



HYLA ACTIVE
ANTIOXIDANT COCKTAIL



HYLA ACTIVE
ANTIOXIDANT COCKTAIL

PIGMENTIERUNG



MG-BL*



HYLA ACTIVE
BRITE LITE



HYLA ACTIVE
BRITE LITE



* EIGENSTÄNDIG ODER 1:1 GEMISCHT MIT MG-HA35 ODER MG-HA35+

UNVERZICHTBAR FÜR DAS MICRONEEDLING

STARTER-KITS 



PROBLEMATIC SKIN - STARTER KIT



PRE-POST PROTOCOL STARTER KIT



BRIGHTENING STARTER KIT



Die oben genannten Empfehlungen beachten, das Produkt im Verhältnis 1:1 mischen als Meso-Glide für Dermapen-Behandlungen (d. h. 1,5-2 ml von jedem Produkt für Standardverfahren) und jeweils auf ein Behandlungsbereich auftragen.

1. AKNE/PROBLEMAUT: DermapenWorld (Australien) 3 Behandlungen
2. ROSACEA: Martina Söderström, Hudvård Söder, Kalmar (Schweden) – 3 Behandlungen
3. PIGMENTIERUNG: Chloe Ahmed, The Chelmsford Skin Clinic (Essex, Vereinigtes Königreich)

MG-KOLLEKTION

STERIL UNVERZICHTBAR

MG STERIL 5ml

INSTITUT

FÜR ZUHAUSE



DEHNUNGS-
STREIFEN



MG-R.A.S.*



HYLA ACTIVE
RETINAL ACTIVE



HYLA ACTIVE
RETINAL ACTIVE
SSSCAR

NARBEN



MG-R.A.S.*



HYLA ACTIVE
RETINAL ACTIVE



HYLA ACTIVE
RETINAL ACTIVE
SSSCAR

HAUTALTERUNG
& SONNENSCHÄDEN



MG-HA35 OR
MG-R.A.S.*



HYLA ACTIVE
ANTIOXIDANT COCKTAIL



HYLA ACTIVE
ANTIOXIDANT
COCKTAIL



* EIGENSTÄNDIG ODER 1:1 GEMISCHT MIT MG-HA35 ODER MG-HA35+

UNVERZICHTBAR

• STERIL • FÜR DEN EINMALGEBRAUCH • PRAKTISCH


STARTER-KITS 



PRE-POST PROTOCOL STARTER KIT
& SSSCAR



PRE-POST PROTOCOL STARTER KIT
& SSSCAR

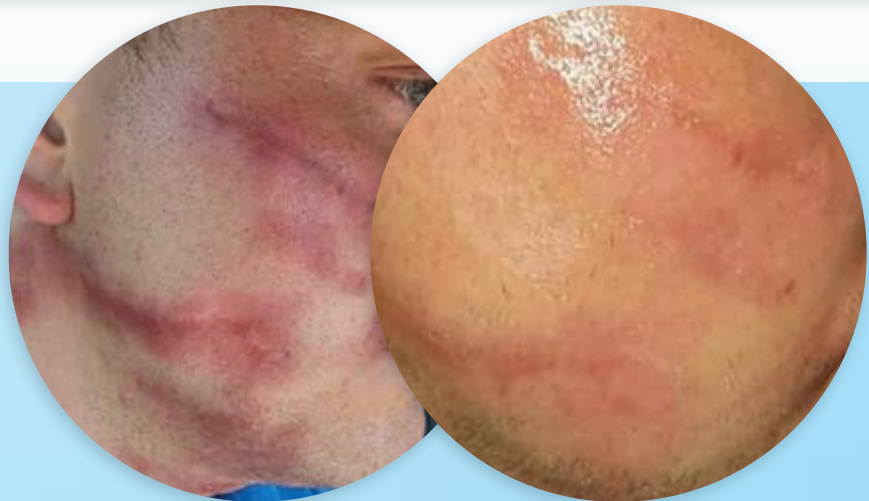

ANTI-AGEING STARTER KIT



Die oben genannten Empfehlungen beachten, das Produkt im Verhältnis 1:1 mischen als Meso-Glide- für Dermapen-Behandlungen (d. h. 1,5–2 ml von jedem Produkt für Standardverfahren) und jeweils auf ein Behandlungsbereich auftragen.

1. DEHNUNGSSTREIFEN: MMskincare (Schweden) – 1 Behandlung
2. NARBEN: Lerina Fosker, ibeauty, (Pretoria, Südafrika) – 3 Behandlungen
3. ALTERUNG UND SONNENSCHÄDEN: Carly Knowles, Bella Pelle Clinic (Gold Coast, Australien) – 4 Behandlungen

SCHRITTE DER DERMAPEN-BEHANDLUNG

Dp Dermaceuticals wurden für die Anwendung vor, während und nach Dermapen-Behandlungen entwickelt und sind die einzigen Protokollprodukte, die speziell für die Durchführung eines Microneedlings entwickelt wurden. Diese Protokolle gewährleisten optimale klinische Ergebnisse und bieten ein persönliches Hautpflegeprogramm, das die Ergebnisse maximiert und erhält. **Es stehen mehrere Meso-Glide-Behandlungsoptionen zur Verfügung:**



1. Eco-Option
Meso-Glide-Mischung




1. MG-Kollektion
Eigenständig




1. MG-Mischung mit MG-HA35
Mischungsverhältnis 1:1 mit MG-BL, MG-CLR, MG-R.A.S.



1. MG-Premium-Option mit MG-HA35+
Mischungsverhältnis 1:1 mit MG-BL, MG-CLR, MG-R.A.S.

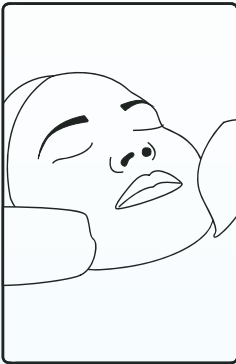

1. Reinigen mit
TRI-PHASE CLEANSER

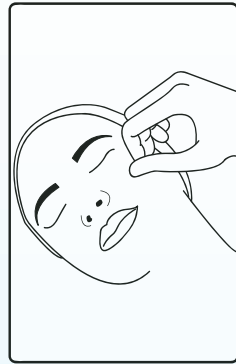

2. Diagnose stellen und
dokumentieren mit Fotos




3. TLA/Anästhetikum oder
CBD-Öl** Anweisungen
befolgen, entfernen




4. Steriles Verfahren mit
DpSleeve, ACM-Kit




5. Haut desinfizieren mit
CLINIPREP

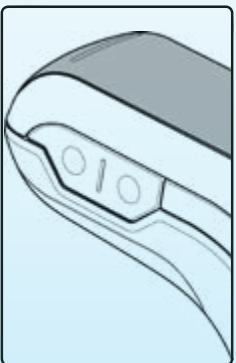

6. Gerät einstellen
Geschwindigkeit, Tiefe
auswählen, siehe Hand-
buch

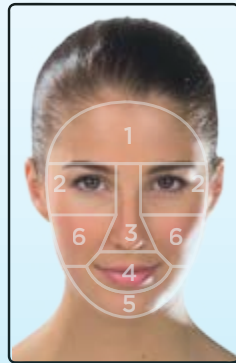


**7. Bereich visuell untertei-
len, Topikum auftragen**
und jeweils 1 Bereich
behandeln

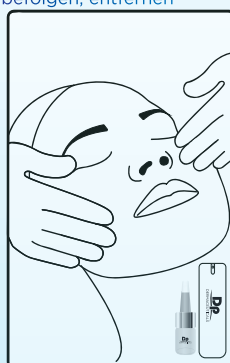

**8. MESO-GLIDE MG-
HA35 oder HYLA ACTIVE**
auftragen & jeweils 1
weiterer Bereich




9. Dermapen gemäss
Anleitung anwenden

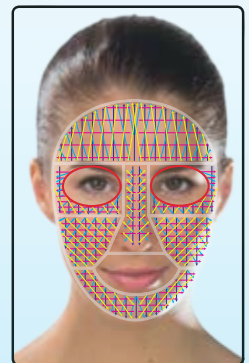


**9. Behandlungs-Richtun-
gen** vertikal, horizontal,
diagonal rechts, links,
siehe Handbuch



10. Sauber wischen und
ÜBER PRO Peel gemäss
Anleitung auftragen

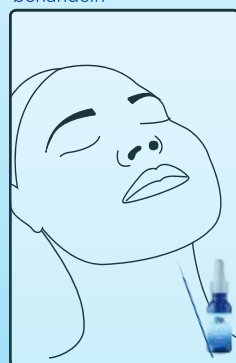

**11. ÜBER MD Peel auftra-
gen** gemäss Anleitung
«SPOT» (nur für erfahrene
Anwender)

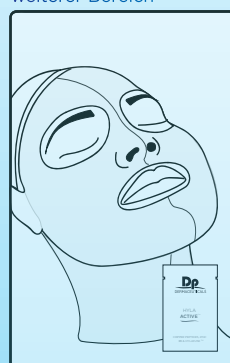

12. Maske auftragen
BRITE LITE: Pigment/Akne
HYLA ACTIVE: Anti-Aging



13. Nach Regeneration
VITAMIN RICH REPAIR
auftragen



14. Nach Regeneration
COVER RECOVER auf-
tragen

* Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Advanced Skin Innovations von Dermapen und unter Dermapenworld.com/prozone

** DermapenWorld verwendet aufgrund des Komforts des Dermapen 4, seiner beruhigenden Protokolle und seiner klinischen Vorteile in der Regel kein topisches Lokalanästhetikum (TLA). Beachten Sie die Herstelleranweisungen, wenn ein TLA erforderlich ist. Ergebnisse können variieren. DermapenWorld und seine Repräsentanten übernehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse der Behandlung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben beratenden Charakter. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns unter www.dermapienworld.com oder wenden Sie sich an einen autorisierten DermapenWorld Vertriebspartner.

PROTOKOLLE FÜR DERMAPEN

TYPISCHE BEISPIELE ...

Vorbereitung: Reinigen Beruhigen Desinfizieren	Nach der Reinigung mit Dp Dermaceuticals TRI-PHASE CLEANSER oder CLR FOAM CLEANSER eine mandelgrosse Menge MICRO DERM EXFOLIANT auf die leicht feuchten Hände geben und mit leicht kreisenden Bewegungen das Peeling durchführen. Die Augenpartie aussparen. Mit feuchten Baumwolltüchern oder Gaze entfernen. Optionaler Patientenkomfort – CBD ELIXIR (0,25 ml) kann sublingual angewendet werden – jeweils einen Tropfen unter die Zunge geben. Einwirken lassen. CBD ELIXIR auf den Behandlungsbereich auftragen und den Lymphbahnen folgen (siehe Seite 219). CBD ELIXIR mit dem SSS Massage ROLLER Aufsatz der Dermapen 4 Nadelkartusche einmassieren. • Einstellungen: Die Geschwindigkeit des Dermapen 4 wird auf 1 (langsamste Geschwindigkeit) und die Tiefe auf 0,25 (niedrigste Tiefeneinstellung) eingestellt. Sobald das Produkt vollständig in die Haut eingezogen ist, den Behandlungsbereich mit CLINIPREP und Gaze reinigen, um den Reiniger, das Peeling oder ggf. die topische Anästhesiecreme zu entfernen. Den Aufsatz ggf. mit Gaze entfernen. Den Behandlungsbereich mit Dp Dermaceuticals CLINIPREP und Gaze desinfizieren, um den Reiniger, das Peeling oder ggf. die topische Anästhesiecreme zu entfernen. Anschliessend den gesamten Behandlungsbereich leicht besprühen, bevor mit der Dermapen-Behandlung fortgefahren wird.			
Während der Behandlung und Behandlungsspezifikationen * Jedes MG kann eigenständig verwendet oder 1:1 mit MG-HA35 oder MG-HA35+ gemischt werden. ÜBER Peelings können sofort nach der Behandlung und alle 2 Wochen als eigenständige Behandlung durchgeführt werden. Dp Dermaceuticals sind die zugelassenen und empfohlenen Dermapen-Protokolle während der Behandlung und unterstützen auch die Hautpflege zuhause vor und nach Dermapen-Behandlungen.	Pigmentierung Option 1 – Dp Dermaceuticals MG-BL* – Sterile Einzelfläschchen. Option 2 – Dp Dermaceuticals HYLA ACTIVE und BRITE LITE als Behandlungsmedium 1:1 mischen. Nadeltiefe: Epidermale Pigmentierung/ Melasma: oberflächlich bei 0,5 mm. Dermale Pigmentierung/ Melasma: 0,5–1,5 mm (evtl. erforderlich, um den visuellen Endpunkt zu erreichen) Visueller Endpunkt: Epidermales Melasma = KEIN BLUT, rote Haut = ROTE Entzündungsreaktion (um auf betroffene Keratinozyten und Melanozyten abzu zielen). Gemischtes / dermales Melasma = gelegentliche Punktblutungen (um auf betroffene Melanophagen, Keratinozyten und Melanozyten abzu zielen) * Evtl. sind mehr Durchgänge erforderlich, um diesen visuellen Endpunkt zu erreichen. Empfohlene Maske: Post ÜBER – Brite Lite 3D Sculptured Mask Behandlungsfrequenz: Alle 2–4 Wochen, 3–6 Behandlungen oder bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind.	Akne/Problemhaut Option 1 – Dp Dermaceuticals MG-CLR* – Sterile Einzelfläschchen. Option 2 – Dp Dermaceuticals HYLA ACTIVE und CLR LOTION als Behandlungsmedium 1:1 mischen. Nadeltiefe: Empfohlene Standardtiefe gemäss Handbuch. Visueller Endpunkt: KEIN BLUT, rote Haut = ROTE Entzündungsreaktion. * Evtl. sind mehr Durchgänge erforderlich, um diesen visuellen Endpunkt zu erreichen. Empfohlene Maske: Post ÜBER – Brite Lite 3D Sculptured Mask Behandlungsfrequenz: Alle 2 Wochen, wenn Dp Dermaceuticals NICHT als Pflegeprotokolle für zuhause verwendet werden (wahrscheinlich sind 4–6 Behandlungen erforderlich).* Und alle 4–6 Wochen, wenn korrekte DpD als Pflegeprotokolle für zuhause kombiniert werden (wahrscheinlich sind nur 3–4 Behandlungen erforderlich).* * bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind.	Anti-Aging Option 1 – Dp Dermaceuticals MG-R.A.S* oder MG-HA35+ – Sterile Einzelfläschchen. Option 2 – Dp Dermaceuticals HYLA ACTIVE und BRITE LITE oder RETINAL ACTIVE als Behandlungsmedium 1:1 mischen. Nadeltiefe: Empfohlene Standardtiefe gemäss Handbuch. Visueller Endpunkt: Leichte Alterung = KEIN BLUT, rote Haut = ROTE Entzündungsreaktion. Chronische Falten = gelegentliche Punktblutungen (um auf betroffene Melanophagen, Keratinozyten und Melanozyten abzu zielen) * Evtl. sind mehr Durchgänge erforderlich, um diesen visuellen Endpunkt zu erreichen. Empfohlene Maske: Post ÜBER – Hyla Active 3D Sculptured Mask Behandlungsfrequenz: Alle 6 Wochen, 3–6 Behandlungen oder bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind.	Narben und Dehnungsstreifen Option 1 – Dp Dermaceuticals MG-R.A.S* – Sterile Einzelfläschchen. Option 2 – Dp Dermaceuticals HYLA ACTIVE und RETINAL ACTIVE als Behandlungsmedium 1:1 mischen. Nadeltiefe: 0,5–3 mm (evtl. erforderlich, um den visuellen Endpunkt zu erreichen) je nach behandeltem Bereich. Visueller Endpunkt: BLUT = gelegentliche Punktblutung, um auf betroffene rote / blaue / violette Narben abzu zielen. MEHR BLUT = weisse Narben * Evtl. sind mehr Durchgänge erforderlich, um diesen visuellen Endpunkt zu erreichen. Empfohlene Maske: Post ÜBER – Je nach Bereich oder Grösse der Maske Hyla Active R.E.R. Auf den Bereich kann eine Augen- oder Hals- und Dekolletémaske aufgetragen werden. Behandlungsfrequenz: Alle 6 Wochen, 3–6 Behandlungen oder bis die gewünschten Ergebnisse erreicht sind.
ÜBER Peel Sofort nach der Behandlung	ÜBER PRO – Oberflächliches Peeling, geeignet für Fitzpatrick I-VI • ÜBER PRO Peel mit einem fächerförmigen Peeling-Pinsel oder einer Gaze erst auf die Stirn, dann auf Wangen und Nase auftragen (darauf achten, dass es nicht tropft; nach unten und um das Gesicht herum arbeiten). Es ist wichtig, dass es möglichst gleichmässig aufgetragen wird. Achten Sie darauf, keine Bereiche auszulassen und nicht überlappend aufzutragen. Augen, Ohren und Lippen aussparen. (CBD ÜBER CALM BALM kann auf diese Bereiche aufgetragen werden, um die empfindliche Haut zusätzlich zu schützen.) • 30 Sekunden bis 3 Minuten lang aktivieren. • ÜBER PRO Peel kann 1–2 Mal aufgetragen werden. Vor dem nächsten Durchgang genau auf den Grad von Rötung und Frosting sowie auf die Schmerzskala des Kunden achten. 2–3 Minuten zwischen den Durchgängen warten. Ggf. Luft zufächeln, um für Komfort zu sorgen. ENDPUNKT FÜR ÜBER PRO: Leichtes Erythem, leichtes Kribbeln, Wärme. ÜBER MD – Mitteltiefes, gerinnungsförderndes Peeling, geeignet für Fitzpatrick I-IV ÜBER MD kann nach Bedarf mit einem ÜBER Stick oder Zahnstocher über dem ÜBER PRO Peeling aufgetragen werden. ÜBER MD wie folgt punktgenau auftragen: • ÜBER MD in Glasschale oder ACM Sterilkrit geben – jeweils ½ Tropfer, um Verschwendung zu vermeiden. • Den ÜBER Stick in ÜBER MD tauchen. Die Spitze in den Riss oder die Falten- bzw. Narbenlinie drücken (Spitze nicht überladen; von der sehr aktiven Flüssigkeit wird nur sehr wenig benötigt; die Spitze des Sticks nach Bedarf nachfüllen). Augen, Ohren und Lippen aussparen. • Auf Frosting am ENDPUNKT achten. Nach einer Schicht aufhören, wenn Frosting auftritt. ENDPUNKT FÜR ÜBER MD: Leichtes Erythem, Kribbeln, Wärme – FROSTING. ÜBER MD kann in 1–2 Durchgängen aufgetragen werden. Im Allgemeinen ist nur 1 Schicht erforderlich! Vor dem nächsten Durchgang genau auf den Grad von Rötung und Frosting sowie auf die Schmerzskala des Kunden achten. 3–5 Minuten zwischen den Durchgängen warten. Ggf. Luft zufächeln, um für Komfort zu sorgen. Weitere Informationen: siehe Seite 187 bis 199 in «The Rewritten Skin Journey»			
Nach der Behandlung	1. Nach der Behandlung HYLA ACTIVE oder BRITE LITE 3D SCULPTURED MASK auf das Gesicht auftragen. 2. Die Maske 10–15 Minuten in die Haut einziehen lassen. Die Haut trocken wischen. Wenn ÜBER MD aufgetragen wurde, kann SSSCAR Creme auf das Spot-Peeling aufgetragen werden. (SSSCAR wird auch für die Pflege zuhause empfohlen, um dank der starken Wirkstoffe von ÜBER MD eine schnellere Heilung möglicher Schorfbildung und Pigmentveränderungen zu fördern. Anschliessend *VITAMIN RICH REPAIR und COVER RECOVER** (der geeigneten Farbe) auftragen. * Nach der Entfernung der Maske kann bei Pigmentierung zusätzliches BRITE LITE aufgetragen werden. Nach der Entfernung der Maske kann bei Akne zusätzliche CLR LOTION aufgetragen werden. ** Darauf achten, dass die Korrektoren eingezogen sind, oder trocken tupfen, bevor COVER RECOVER aufgetragen wird.			



CLINIPREP EINE NEUE Ära der Hautdes- infektion

- Antimikrobielle Reinigung
Hautverträglich
- Wirksamer als herkömmliche Alko-
hol- und Chlorhexidinmethoden
- Hochwirksam sowohl für die Haut-
als auch für die Oberflächenreini-
gung

Hauptinhaltsstoffe: Natriumhy-
pochlorit, Phosphorsäure

ACM Hand Sanitiser

ACM HAND SANITISER
bietet eine effektive antimikrobielle
Reinigung, um das Risiko einer
Kreuzkontamination und die
Wahrscheinlichkeit von Bakterien
auf der Haut zu verringern
(besonders geeignet für die
Händedesinfektion). Bietet
Komfort, optimale Hygiene und
Patientensicherheit.

- Tötet 99,99 % der Keime¹ schnell
ab!
- Angenehmer Geruch
- Praktische Methode, um jederzeit
Ihre Hände zu reinigen
- Schnell trocknende Formel, nicht
färbend, stechend oder reizend
- Optionale Grössen und Sorten
- Enthält medizinischen Alkohol mit
nährenden Zusätzen



ACM Sterile Dressing Kit

- Schafft ein bequemes,
zuverlässiges STERILES
Behandlungsumfeld
- Sparen Sie Zeit mit diesem
bequemen, leicht zu
handhabenden All-in-One-Paket
- Benötigt keine Vorbereitungszeit
- Geeignet zur Abgabe von
aseptischen Dp Dermaceuticals
Meso-Glides in einer sterilen
Umgebung für die Behandlung

- **Das Kit enthält:**
 - 1 Standard-Tablett
 - 5 x Vliesstoff-Tupfer, latexfrei
 - 2 x Vliesstoff-Gazen
 - 2 grüne Zangen
 - 1 gelbe Zange
 - 1 Papierhandtuch
 - 1 steriles Tuch aus weissem
Kunststoff



ACM Protection Shield

- Ultraleichte, transparente Schutz-
maske zur Verbesserung der Hy-
giene bei der Behandlung. Bietet
wertvollen Schutz für Behandler
und Kunden. Diese komfortab-
le Maske behindert nicht beim
Atmen und Sprechen, da sie vom
Gesicht entfernt sitzt. Bietet
Schutz vor unangenehmem Atem,
Luftkeimen, mikroskopisch kleinen
Speicheltröpfchen oder Rückstän-
den.
- Für Anti-Contamination Manage-
ment™ empfohlenes Protokoll,
99,99 % antibakterielle transpa-
rente Folie mit spezieller Antibe-
schlagbehandlung für gute Sicht.
Schutz für den Träger und für den
Kunden
- Kein Behinderung beim Atmen,
Sprechen und Sehen
- Komfortabel, schlank und leicht
(5 g)
- Wirtschaftlich, umweltfreundlich,
wiederverwendbar
- Für viele Branchen geeignete
Schutzmaske

ANTI-CONTAMINATION MANAGEMENT (ACM™) INITIATIVEN

UMWELTBEWUSST. SICHER. STERIL.

Im Rahmen unserer Unternehmenspolitik legen wir bei DermapenWorld und Dp Dermaceuticals grossen Wert auf Ausbildung, Protokolle und Hygiene (sterile Verfahren) für die Sicherheit unserer Behandlungsanbieter wie auch unserer Patienten.

Einige unserer wichtigen ACM-Initiativen sind:



Dp Sleeves

- Eng anliegende Schutzhülle zur Verwendung über dem Dermapen 4 und Dermapen 3 zum Schutz vor und zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- Transparent, die Einstellungen bleiben sichtbar
- Steril



Sterile OP-Handschuhe

- Um das hohe Niveau des ACM-Protokolls zu vervollständigen, werden diese hochwertigen OP-Handschuhe einzeln steril verpackt und sind zudem für viele verschiedene chirurgische Verfahren geeignet. Die aus einem hochwertigen Material gefertigten Handschuhe bieten Empfindlichkeit und Komfort, sind aber auch strukturiert, um einen hohen Barrierschutz und sicheren Halt unter nassen oder trockenen Bedingungen zu gewährleisten.
- Überlegene Festigkeit, Passform und Haptik
- Ergonomisches Design für eine geringere Ermüdung der Hand
- Maximales Kontaktgefühl in Fingern und Handfläche
- Entspricht den Qualitätsnormen EN 455, QSR, GMP, ISO
- Steril – durch Gammastrahlung sterilisiert



Sterile OP-Handschuhe

- DermapenWorlds neue Einweg-Behandlungshandschuhe reduzieren den zwar notwendigen, aber schädlichen Gebrauch von Einweghandschuhen, da sie in viel kürzerer Zeit biologisch abbaubar sind. Der Abbau normaler Latex- und Nitrilhandschuhe kann bis zu 100 Jahre dauern, unsere Handschuhe bestehen jedoch aus organischem Material, das die mikrobielle Aktivität in Mülldeponien fördert. 20 % werden innerhalb von sechs Monaten biologisch abgebaut; der VOLLSTÄNDIGE biologische Abbau dauert fünf Jahre. Dieses Produkt entspricht der umweltfreundlichen und umweltschonenden Einkaufspolitik des Unternehmens.
- Bahnbrechende Bio-ECO-GREEN-Technologie für Schutzhandschuhe
- Vollständig biologisch abbaubar
- Latexfrei
- Biologisch abbaubares Nitril
- Haltbarkeit nicht beeinträchtigt
- Aus organischem einzigartigem Biomaterial, das die mikrobielle Aktivität in Mülldeponien fördert
- Fördert Nachhaltigkeit und unterstützt den Umweltschutzgedanken
- Allergiefrei, proteinfrei

4-IN-1-INNOVATIONEN

KOMPATIBEL mit anderen DermapenWorld Produkten und Lösungen



MICRONEEDLING



MESO INFUSION




TATTOO REMOVAL &
MESO-LINE INFUSION



SSS STIMULATION



Dermapen Tattoff™

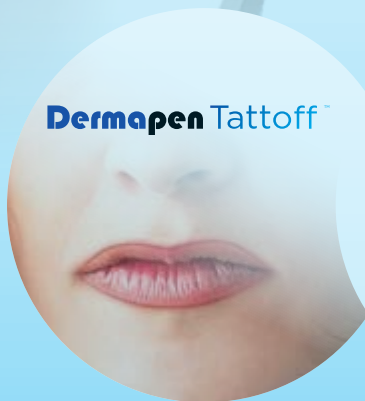

Dermapen Infuse



Dermapen Inject



WAS HÄLT SIE DAVON AB, DAS BESTE ZU HABEN?

ES GIBT NUR EINEN ORIGINAL DERMAPEN.
SCHLIESSEN SIE SICH DER DERMAPEN 4 REVOLUTION AN.

Als DermapenWorld ATP (Authorised Treatment Provider) kaufen Sie nicht nur ein Gerät. Sie investieren in Ihr Unternehmen mit der branchenweit BESTEN Kapitalrendite (ROI). «Dermapen-Behandlungen» sind nach wie vor die Microneedling-Behandlungen, die am häufigsten gesucht werden. Weltweite Vertriebspartner und Unterstützung, Schulungen, Online-Webinare, Marketing, 7 Jahre Garantie und vieles mehr.

Das «Umschreiben der Hautreise» beginnt hier. Bieten Sie Ihren Kunden das Beste.



DAS BUSINESS-BUILDER-KIT
UMFASST:

33 Nadelkartuschen
33 Masken, 33 Hüllen
Behandlungsprodukte
7 Jahre Garantie
und vieles mehr...



Schliessen Sie sich noch heute der Dermapen
4 Revolution an und werden Sie ein Authorised
Treatment Provider mit dem AWARD WINNING
Microneedling-Gerät



WAS HÄLT SIE DAVON AB, DAS BESTE ZU HABEN?



SCHNELLER



SICHERER



MEHR PATIENTEN



BESTE KAPITALRENDITE

VERLIEREN SIE NICHT DEN ANSCHLUSS. Wenn Sie ihn einmal ausprobiert haben, werden Sie ihn nicht mehr missen wollen.

Nehmen Sie den ersten wirklich digitalen Microneedling-Pen der Welt so schnell wie möglich in die Hand!

Holen Sie das BESTE aus Ihren Dermapen-Behandlungen! VERBESSERN Sie Ihre Behandlungsergebnisse mit den von Dp Dermaceuticals genehmigten Protokollen: Unverzichtbar für das Microneedling

STEIGEN SIE NOCH HEUTE UM

www.lasermed24.ch

SCHREIBEN SIE UNS EIN E-MAIL:

info@lasermed.ch

RUFEN SIE UNS AN

071 454 70 30

KONTAKT



DERMAPEN TREATMENTS
SEARCHED x 30 More than any other brand



Dermapenworld
ORIGINAL TRUSTED
AUSTRALIAN

DermapenWorld or its representatives hold no responsibility for sessions outcomes. This program is not designed to cure disease. Individual results may vary. To be used only as directed. Dermapen, Dp Dermaceuticals, Antioxidant Cocktail, Brite Lite, ClniPrep, CLR Lotion, CLR Foam Cleanser, Cover Recover, ECO-Green, ECO-Glove, Hyla Active, MicroDerm Exfoliant, Meso-Glides, MG-BL, MG-CLR, MG-HA35, MG-HA35+, MG-R.A.S., R.E.R, Retinal Active, Skin Veneer, Tri-Phase Cleanser, ÜBER PRO, ÜBER MD Peel, Vitamin Rich Repair, are trademarks of Equipmed. If you do not agree to these terms and conditions do not purchase this product. Your purchasing of this product is your acceptance of these terms and conditions and you acknowledge that DermapenWorld at its absolute discretion may at any time remove, alter or otherwise change these terms and conditions and you are bound by the new terms and conditions. To the extent permissible under applicable laws, no responsibility is assumed for any injury and/or damage to persons, animals or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any ideas, instructions, methods, products or procedures. If this product or its intended use contains or infers medical or health sciences information, it is intended for professional use within the medical field. No suggested test or procedure should be carried out unless, in the reader's judgment, its risk is justified. Because of rapid advances in sciences, we recommend that the independent verification of diagnoses and treatment regime should be made. By purchasing our products you agree to use the products for their intended use only. If you use the product or any associated service for another purpose you assume full responsibility for any loss or damage arising and void any warranty. EC REP: Equipmed USA BV, 4335BH, Netherlands. Manufactured in USA, exclusively for DermapenWorld, 13 Narabang Way, Sydney, 2085, Australia.