

# Danis Procedure Pack

SX-ELLA Stent Danis



# Danis



Stentsystem für die Behandlung von blutenden Ösophagusvarizen

Einfache Anwendung ohne den Bedarf einer Endoskopie / Röntgenkontrolle

Sichere Hämostase durch direkte Kompression der Varizen

Ermöglichung der peroralen Aufnahme nach der Stentimplantation



3D animation



## Beschreibung

### Procedure Pack mit dem SX-ELLA Stent Danis

Selbst-expandierbarer Nitinolstent, der in dem zum Gebrauch vorbereiteten Einführsystem geladen ist. Komplettes Procedure Pack beinhaltet alle Artikel, die für die Anwendung notwendig sind.

### Indikationen

Der Danis-Stent von SX-ELLA wird angewendet, um akute und/oder anhaltende Blutungen aus Ösophagusvarizen zu stoppen.

### Kontraindikationen

- ☑ Malignome oder Strikturen mit Beteiligung des Ösophagus
- ☑ Strahlentherapie des Brustkorbes oder des Ösophagus in der Vorgeschichte
- ☑ Malignome des Rachens oder Kehlkopfes
- ☑ Malignome der Bronchien oder Fisteln
- ☑ Malignome des Magens
- ☑ Verdacht auf Blutung wegen Verletzungen des oberen Gastrointestinaltrakts durch Fremdkörper

### Eigenschaften / Vorteile

- ☑ Variable Abstände im Weben des Stents, um sich an die Peristaltik anzupassen - reduktion der Migrationsrate.
- ☑ Standardisierte Kompression der Varizen garantiert effektive Hämostase.
- ☑ Atraumatische Stent-Enden.
- ☑ Röntgendichte Markierungen an beiden Stent-Enden und in der Mitte - akkurate Stentpositionierung.
- ☑ Metalldrahtschlingen aus einer spezifischen medizinischen Legierung an beiden Stent-Enden - hohe mechanische Haltbarkeit und Widerstand gegen Säure.
- ☑ Einfaches endoskopisches Entfernen des Stents nach 7 Tagen.

### Vorteile des Verfahrens

- ☑ Sofort implantierbar ohne Endoskopie / Röntgenkontrolle, auch in Notsituationen.
- ☑ Patient kann direkt nach der Stentimplantation Nahrung oral zu sich nehmen.

### Zusätzliche Informationen

Danis Procedure Pack (019-08S-25-135) besteht aus einem Kunststoffkoffer, der alle Artikel enthält, die für die Anwendung notwendig sind:

- ☑ Einführsystem geladen mit dem Stent, Führungsdraht, Injektionspritzen, Mundstück, Nierenschale, Papierschürze, Abfallbeutel mit Clip, Handschuhe.

Danis Procedure Pack Basic (019-08S-25-135-B) besteht aus:




- ☑ Einführsystem geladen mit dem Stent, Führungsdraht, Injektionspritze 50 ml.

Das Einführsystem hat einen Durchmesser von 9,4 mm (28 F) / 6,6 mm (20 F) und ist in der Standardlänge von 60 cm verfügbar.



### Verfügbare Größe

REF Nr.	SX-ELLA Stent Danis			Einführsystem	
	Durchmesser der Tulpen [mm]	Durchmesser des Stents [mm]	Nominale Stentlänge [mm]	Aktivlänge [cm]	Aussendurchmesser [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	28 / 20
019-08S-25-135-B	30	25	135	60	28 / 20

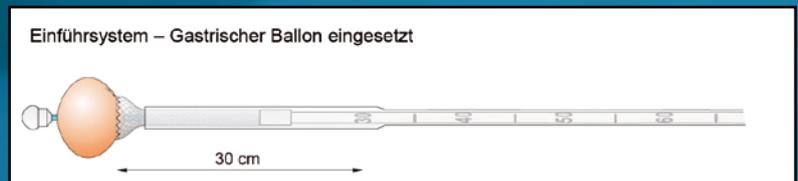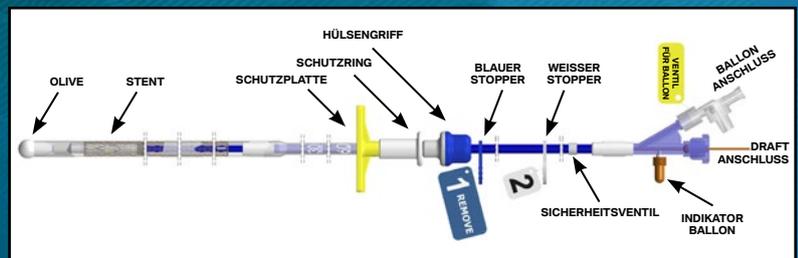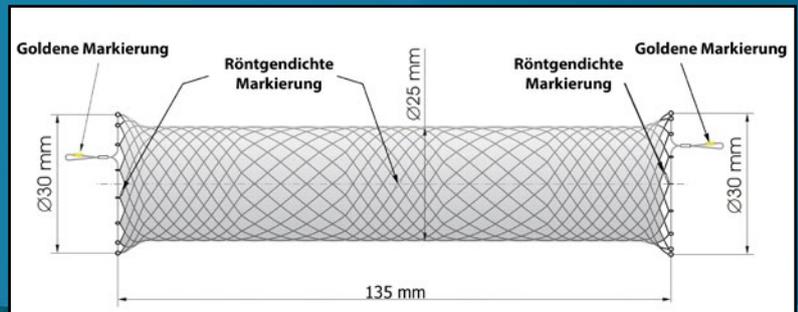

Distributor:

Distribution Switzerland:

**lasermed**  
INNOVATING MEDICINE

www.lasermed.ch

Hersteller:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horakove 504/45, Trebes  
500 06 Hradec Kralove, Tschechische Republik

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655  
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu