




Dr. ARNOLD

**Le meilleur ami de la
santé intime**

PELVITOUCH

La nouvelle thérapie des problèmes
et troubles de la sphère urogénitale

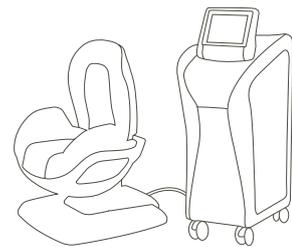

DEKA
Innate Ability

PELVITOUCH

UNE BONNE SANTÉ INTIME

INCONTINENCE URINAIRE
DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE
DOULEURS PELVIENNES CHRONIQUES
INCONTINENCE FÉCALE





La nouvelle technologie pour la santé intime

Dr. ARNOLD est un nouvel appareil qui stimule de manière sélective les muscles du plancher pelvien au moyen de champs magnétiques, et selon des protocoles spécifiques, pour traiter de nombreuses pathologies et affections intimes.

Le traitement **PelviTouch par Dr. ARNOLD** utilise la technologie **TOP FLAT MAGNETIC STIMULATION** pour agir doublement sur le plancher pelvien par induction de stimulations intenses et involontaires : renforcement et décontraction. Cette technique améliore les performances des muscles du plancher pelvien et contribue à la récupération du contrôle neuromusculaire.

Pourquoi choisir Dr. ARNOLD et PelviTouch ?

Top Flat Stimulation = efficacité et confort


Grâce à la technologie **TOP-FMS**, le champ électromagnétique est réparti de manière uniforme et sans pics d'intensité pour assurer une grande tolérance au traitement.

Ergonomie

Le département Recherche et Développement de DEKA a conçu cet appareil dans l'optique d'assurer aux patientes et patients un confort maximum et la sécurité du traitement.

Santé intime par DEKA

DEKA s'est toujours préoccupé de la sphère intime et de l'amélioration de la qualité de vie. Cette attention se concrétise dans le développement de techniques non ou peu invasives destinées aux zones intimes féminines et masculines.

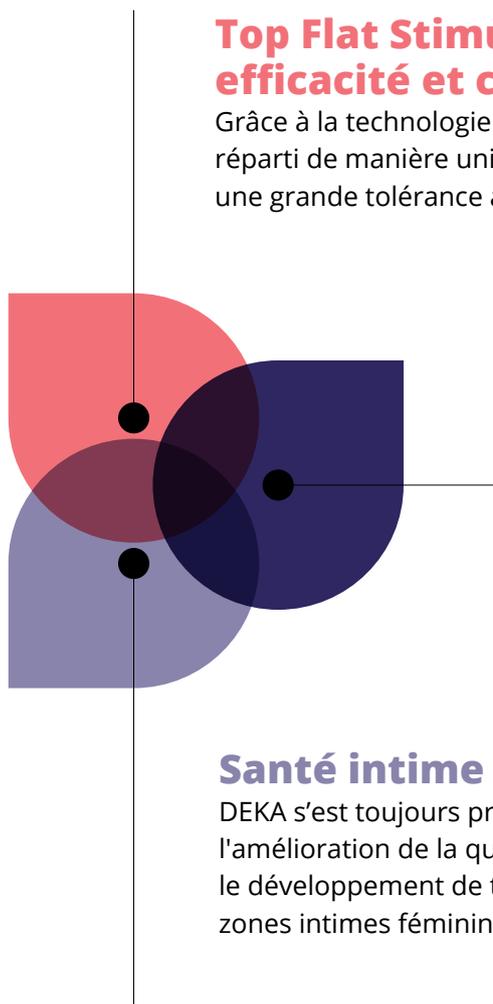



FONDÉ SUR LA SCIENCE

Appareil de rééducation

Le traitement PelviTouch par **Dr. ARNOLD** agit directement sur les tissus neuromusculaires et induit des contractions ciblées qui ne peuvent être obtenues par des exercices de rééducation ou une stimulation électrique superficielle. Ces contractions stimulent les muscles du plancher pelvien, favorisent le rétablissement du contrôle neuromusculaire et améliorent la fonction de la zone traitée.

Bénéfices cliniques obtenus au moyen de ce traitement :

prévention de l'incontinence urinaire, meilleure **conscience** muscles pubo coccygiens, **amélioration de la fonction érectile** et **augmentation du tonus du plancher pelvien** par **rééducation des muscles du plancher pelvien**.

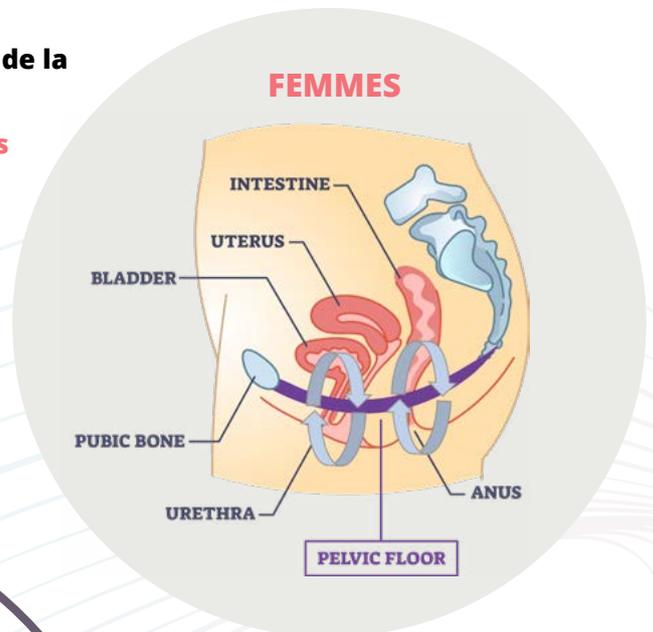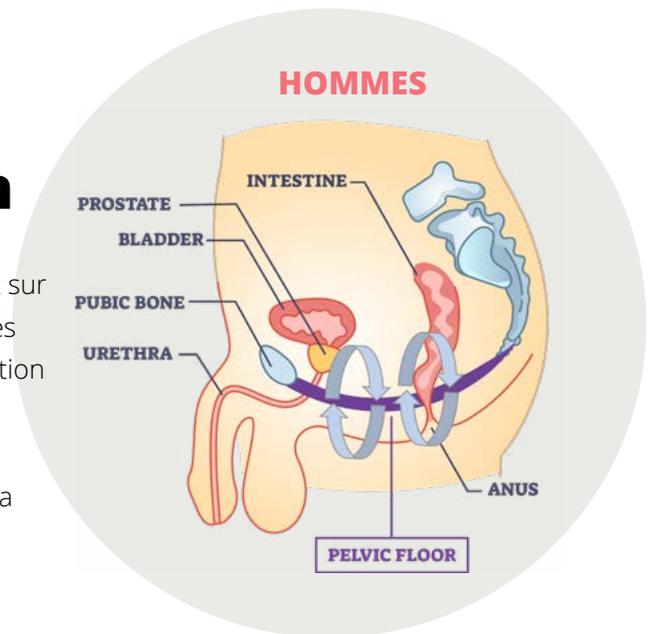

TOP FMS

Flat Magnetic Stimulation

TOP FMS : stimulation modulée du tissu musculaire

- Raffermissment et rééducation des muscles du plancher pelvien
- Stimulation de haute intensité
- Diminution du besoin d'uriner
- Amélioration de la fonction érectile
- Amélioration de la qualité de vie

PelviTouch par Dr. ARNOLD

Le meilleur ami de la femme

Selon la littérature scientifique, cette technologie permet de traiter efficacement et en toute sécurité l'incontinence urinaire par l'effort, impérieuse et mixte, en renforçant les muscles du périnée. Les patientes ayant bénéficié du traitement **PelviTouch** ont déclaré avoir ressenti une diminution de la sévérité des symptômes d'incontinence urinaire et moins de douleurs pelviennes qui dégradent leur qualité de vie. Subjectivement, des patientes ont aussi rapporté que le traitement avait augmenté la satisfaction sexuelle.

Dr ARNOLD est également indiqué pour les patientes souffrant d'hypertonie musculaire et de **syndrome de douleur pelvienne chronique (CPPS)**. L'action électromagnétique régulière de la technologie TOP-FMS stimule les muscles du plancher pelvien selon des protocoles spécialement conçus. La tension excessive des muscles du plancher pelvien, l'hypertonie, peut aussi contribuer à l'apparition d'une cystite. PelviTouch détend les muscles du plancher pelvien et donc réduit les tensions musculaires et l'inconfort provoqué par la cystite. L'état des tissus vulvaires est ainsi amélioré, réduisant les frottements dus aux rapports sexuels et donc les lésions de la muqueuse. Il s'ensuit une réduction des infections et irritations post-coïtales. La sensation impérieuse d'uriner diminue, tout comme les douleurs ou les brûlures dans la région de la vessie.



PelviTouch par Dr. ARNOLD

La solution "discrète" pour la santé intime masculine : dysfonctionnement érectile et incontinence urinaire

PelviTouch traite la dysfonction érectile par la normalisation du plancher pelvien et l'optimisation de l'érection.

Lors du traitement, les muscles du plancher pelvien sont renforcés par des contractions de haute intensité de quelques secondes. Ces contractions ne sont pas contrôlées par la fonction cérébrale, car les nerfs périphériques du plancher pelvien sont directement stimulés. Elles sont d'une intensité supérieure à celle qui peut être obtenue par la seule volonté de mouvement musculaire.

En contournant les mouvements musculaires volontaires, PelviTouch induit une relaxation musculaire et réduit la raideur musculaire dans les pathologies avec spasmes musculaires dans la région pelvienne.

PelviTouch agit de manière ciblée sur les muscles du plancher pelvien en rétablissant le contrôle neuromusculaire et réduisant ainsi les symptômes de l'incontinence.

En cas d'incontinence d'effort due par exemple à une prostatectomie radicale, les muscles du plancher pelvien sont renforcés par des contractions de haute intensité de quelques secondes. PelviTouch a également un effet inhibiteur sur l'hyperactivité du détrusor, souvent responsable de l'augmentation de la fréquence des mictions et de l'envie d'uriner. La plupart des patients traités rapportent une réduction de la fréquence des mictions et de la quantité d'incontinence, ainsi qu'une diminution des mictions nocturnes et un meilleur contrôle de l'urgence.



L'ergonomie avant tout !

L'efficacité du traitement dépend essentiellement de la position du patient. Raison pour laquelle DEKA a développé un fauteuil commode avec un dossier et une hauteur réglable pour offrir au patient une **position optimale** lui permettant de bénéficier du traitement de manière confortable et détendue.



Les effets de PelviTouch

PelviTouch par Dr ARNOLD est destiné à différentes applications, en particulier :

- **Gynécologie** : prévention et traitement du prolapsus génital.
- **Urologie** : prévention et traitement de l'incontinence urinaire, amélioration du soutien de l'urètre et du mécanisme de fermeture du sphincter, en particulier à l'effort. Dans la santé féminine, les symptômes de la cystite sont réduits. Dans la santé masculine, PelviTouch traite le syndrome de douleur pelvienne chronique (CP/CPPS).
- **Coloproctologie** : prévention et rétablissement de la fonction anorectale.
- **Sexualité** : en renforçant la musculature du périnée, PelviTouch par Dr. Arnold contribue positivement à la vie sexuelle, notamment en réduisant la vulvodynie et la dysfonction érectile.

Dr. ARNOLD est une technique sans opérateur, facile à utiliser, particulièrement appréciée des gynécologues, urologues, physiothérapeutes, proctologues, et également des patientes et patients, car elle offre, en plus des avantages évidents de la thérapie PelviTouch, un traitement indolore qui est effectué en restant vêtu.

PelviTouch est un traitement qui rejoint la ligne **DEKA** dédiée à la **santé intime féminine** avec la technologie laser CO₂ **"MonaLisa Touch®"** qui permet d'obtenir des résultats optimaux dans le traitement de l'atrophie vulvo-vaginale, de la cystite bactérienne et de l'incontinence d'effort légère.

Ce qu'en disent les experts

Nous traitons des patient-e-s souffrant d'incontinence et les résultats sont vraiment encourageants. Ils sont également excellents sur l'hypertonie des muscles du plancher pelvien, responsable de douleurs pelviennes chroniques. Les patientes sont satisfaites et heureuses ; elles retrouvent rapidement une vie sociale convenable. C'est ce qui nous intéresse et dont nous avons besoin : contracter des muscles de manière inconsciente de la patiente en offrant ainsi une rééducation profonde du plancher pelvien.

Finalement, cette technologie agit aussi dans la prévention des prolapsus génital et anorectal, et donc l'amélioration de la vie sexuelle des patientes et patients”.

Dr. Andrea Biondo M.D.

Palerme (Italie)

Le Dr Arnold s'est révélé être une méthode efficace et sûre pour rétablir la fonction du plancher pelvien. Sa technologie unique, basée sur la « Top Flat Magnetic Stimulation », favorise le renforcement ciblé et la restauration suite au vieillissement et aux pathologies en relation avec ces structures essentielles, étroitement liées à la sexualité et à la qualité de vie. C'est l'un des outils les plus importants de mon cabinet”.

Dr. Pablo Gonzales M.D.

Pereira (Colombie)

La chaise électromagnétique Dr Arnold pour la rééducation du plancher pelvien s'est révélée être un outil extrêmement efficace dans notre clinique. Nous l'utilisons soit seule pour traiter l'incontinence d'effort, soit en combinaison avec le laser CO₂ fractionné MonaLisa. Dans notre clinique, il est devenu le Gold Standard et nos patients sont très satisfaits des résultats obtenus”.

Dr Antonio Posada M.D.

Saltillo, Coahuila (Mexique)

PelviTouch s'est révélé particulièrement efficace dans le traitement de la dysfonction érectile et du syndrome de douleur pelvienne chronique (CPPS), une maladie qui peut avoir un impact important sur la santé sexuelle. PelviTouch a montré des effets très positifs dans la réduction des douleurs pelviennes, des symptômes urinaires et l'amélioration de la qualité de vie des patients, sans recourir à des procédures invasives ou douloureuses”.

Prof. Nicola Mondaini M.D.

Florence, Italie

PelviTouch par Dr Arnold est un traitement particulièrement indolore. Lorsque j'ai commencé à traiter l'incontinence urinaire chez les hommes, j'ai constaté que les patients faisaient également état d'améliorations de la fonction érectile. Nous avons donc mis au point un protocole et un cycle de traitement après lesquels presque tous les patients étaient satisfaits, y compris au plan psychologique”.

Dr. Daniel Galimberti M.D.

Buenos Aires, Argentine

Les forces du Dr. ARNOLD

- **Confort maximal**, totalement sans douleur
- **Sans l'inconfort typique des thérapies habituelles** (exercices de Kegel, biofeedback, physiothérapie, électrostimulation fonctionnelle, ondes de choc)
- Sans opérateur, méthode **facile à utiliser**
- **Amélioration de la qualité de vie**
- **Meilleure conscience** de la fonction du plancher pelvien grâce à la rééducation
- **Protocoles de traitement** adaptés aux besoins des patients
- **Action préventive** sur plusieurs domaines de la **santé intime**

 **Réservé aux utilisateurs DEKA :**
une assistance précieuse en cabinet médical

DEKA *Club*





Dr. ARNOLD

DEKA

Caractéristiques techniques

Dr. ARNOLD	
Type d'énergie	Champ électromagnétique
Intensité	Jusqu'à 2,5 T
Durée de l'impulsion	250 μ s \pm 20 %
Fréquence de répétition	Jusqu'à 150 Hz
Alimentation	Système 100-240 W 1500 VA Chaise 100-240 W 380 VA
Dimensions et poids	Unité de commande 41 cm x 126 cm x 73 cm (L x H x P) 60 kg Chaise 77 cm x 124 cm x 77 cm (B x H x T) 68 kg

Cette brochure n'est pas destinée au marché US.



Dr. ARNOLD

Suivez-nous



www.dekalaser.com

Distributeur
Distribution Switzerland:



lasermed
INNOVATING MEDICINE

www.lasermed.ch



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italie
Tél. +39 055 8874942 - FAX 031 055 8832884

DEKA Innate Ability

En tant que Spin-off de la société El.En. Group, DEKA est un leader mondial dans le développement et la fabrication de lasers et de sources lumineuses pour les applications dans le domaine médical. DEKA commercialise ses appareils dans plus de 120 pays au travers d'un vaste réseau de distributeurs internationaux et de succursales directes en Italie, en France, au Japon et aux USA. L'excellence est la marque de fabrique issue de l'expérience et de la reconnaissance de DEKA dans la recherche et le développement depuis plus de trente ans. La qualité, l'innovation et l'excellence technologique confèrent à DEKA et à ses produits une position unique et exceptionnelle sur la scène mondiale. DEKA fabrique des appareils laser conformément aux spécifications de la directive 93/42/CEE et son système d'assurance qualité est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Tous droits réservés - Afin d'améliorer ses produits, la société se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Ce document est réservé aux professionnels de la santé.